


## Alkometer FC10 – Unimenco A/S

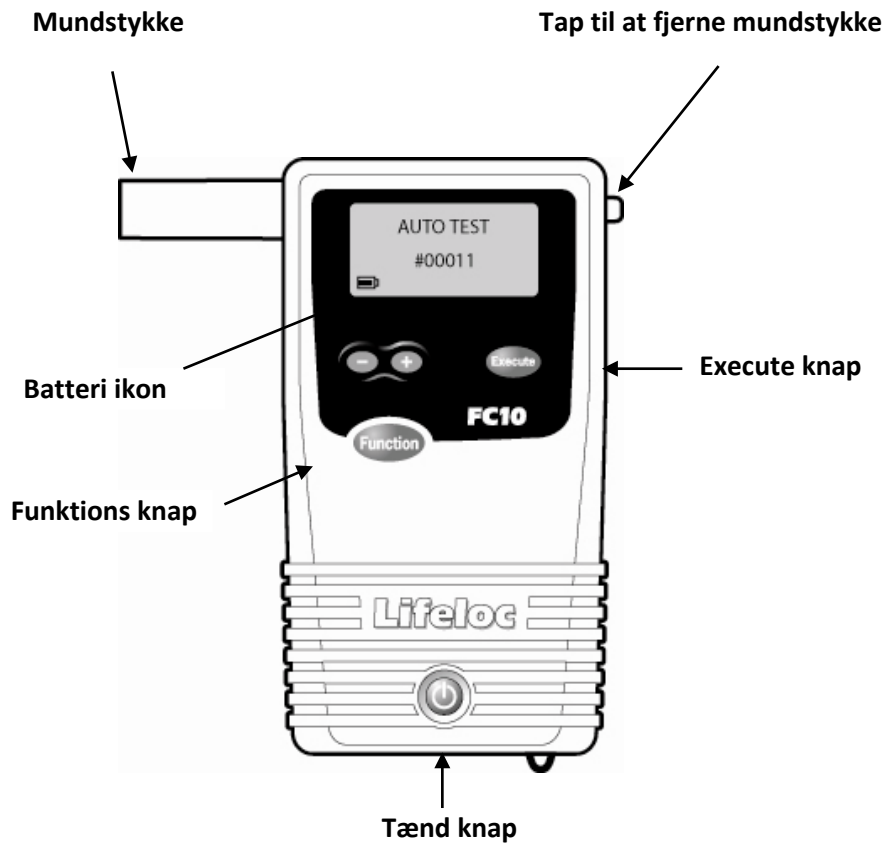


### Påsatning af mundstykke:

Fjern mundstykket fra dets indpakning, og undlad at røre ved den ende som testpersonen skal puste i.

Anbring hullerne på bagsiden af mundstykket over indgangsportene på instrumentet. Tryk mundstykket på plads.

Mundstykket kan kun vende én vej – sørg for at portene passer i de to huller i mundstykket.

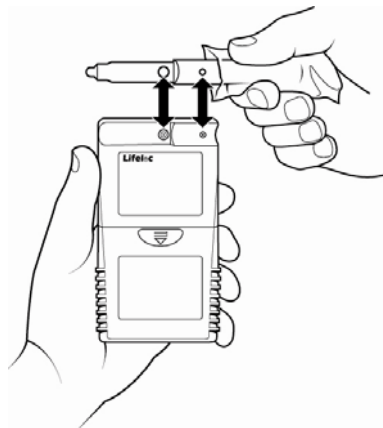


## Sådan tager du en prøve eller test.

**OBS!** Før en prøve tages skal du være sikker på at testpersonen ikke har indtaget hverken væske eller mad inden for de sidste 15 min. Det vil forhindre at mundalkohol influerer på resultatet.

### Auto test mode – (Nemmest)

- Overhold reglen om de 15 min.
- Tryk på "Tænd knappen".
- Alkometeret vil foretage en automatisk check
- Indstil til "Auto test" i displayet.
- Påsæt et mundstykke på bagsiden af alkometeret.
- Bed testpersonen om at puste i en lind strøm ind i mundstykket i ca. 4 sekunder. (Alkometeret bipper når testpersonen har pustet nok)
- Aflæs resultatet.

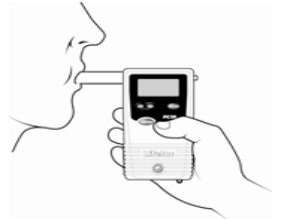

### Manuel test mode – bruges hvis testpersonen ikke har nok lungeluft.

- Overhold reglen om de 15 min.
- Tryk på "Tænd knappen".
- Tryk på "Funktions knappen" indtil der står "Manuel Test" i displayet.
- Påsæt et mundstykke på bagsiden af alkometeret.
- Bed testpersonen om at puste i en lind strøm ind i mundstykket
- Ved slutning af pustet tryk da på "Execute knappen".
- Aflæs resultatet.

### Passiv test mode – Spor alkohol med enten POS eller NEG.

- Overhold reglen om de 15 min.
- Tryk på "Tænd knappen".
- Tryk på "Funktions knappen" indtil der står "Passive Test" i displayet.
- Ingen behov for mundstykker
  - Hold bagsiden af alkometeret ca. 10 cm fra testpersonens mund.
- Bed testpersonen om at puste mod den orange port.
- Tryk på "Execute knappen" mens testpersonen puster.
- Aflæs resultatet.

