

Oral Fluid Spyttest – OF6

THC/COC/AMP/MOR/METH.AMP/BZO

1. **Fjern** First Sign testen fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. **Fjern** plasten fra opsamlings-svampen.



3. Bed testpersonen om at placere opsamlings-svampen i munden.
4. Saml så meget spyt som muligt ved at køre svampen mod tungen og kinderne. **Gør dette i minimum 3-5 minutter.**



5. **Før opsamlingspuden ind i opsamlingsglasset.**
6. Opsamlingspuden skal skrues på plads, så puden bliver presset mod bunden af glasset. **Obs.** Kan den ikke let, skrues i bund, er der ikke samlet nok spyt. Gentag pkt. 4



7. **Tag nu tid.** Fjern labelen hvor der står "peel the label". Resultatet fremkommer efter 10 minutter, og kan aflæses op til 15 minutter efter prøven er taget.



8. **Test for stoffer:** Resultatet kan aflæses efter de 10 minutter. evt. før hvis samtlige streger i aflæsningsvinduet er fremkommet. Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.




Aflæsning af Test Resultat

Ugyldigt Resultat

Ingen streg i **KONTROL(C) området: testen er ugyldig**, også selvom der er streger i testområdet. Gentag med en ny test.

Eksempel:

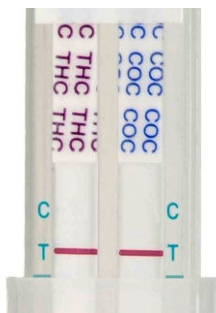


THC: Ugyldig
COC: Ugyldig

Negativt Resultat (ingen stoffer)

For hvert stof, skal to farvede streger kunne ses:

- **En i KONTROL(C) område**
- **En i det specifikke TESTområde**

Farven på stregerne kan variere i styrke. Hvis en streg kan ses med det blotte øje (skimtes), er resultatet **negativt**. Uanset hvor utydelig den er. Eksempel:

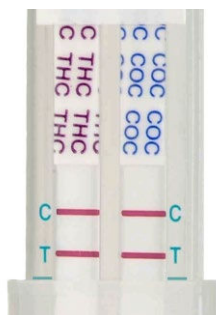


THC: Negativ
COC: Negativ

Positivt Resultat

En farvet streg i **KONTROL(C) området** skal komme til syne. Når der ikke er nogen farvet streg i det specifikke **TESTområde**, så er testen positiv for det pågældende stof.

Eksempel:

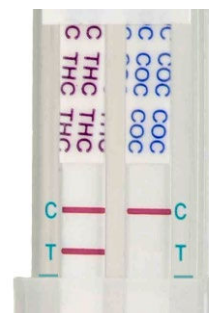

THC: Negativ
COC: **Positiv**

Ordforklaring:

THC: Hash, **METH:** Methamfetamin, **AMP:** Amfetamin, **COC:** Kokain, **OPI:** Opiater, **BZO:** Benzodiazepiner,

Tilsligtet brug

Testdig Oral Fluid screeningstest til at analysere for stoffer i spyt ved nedenstående grænseværdier. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter.

THC Δ^9 -THC (25ng/ml): Hash, **COC (20ng/ml):** Kokain, **AMP(50ng/ml):** Amfetamin, **OPI(40ng/ml):** Opiater, **METH.AMP(50ng/ml):** Metamfetamin(inkl. MDMA), **BZO(50ng/ml):** Benzodiazepiner,

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat.

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have indtaget noget indenfor 10 min. før testen udføres. Det gælder også tobaks- og nikotinprodukter.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Opsamlingspuden skal være helt gennemvædet ellers er der ikke samlet nok spyt. Typisk vil det tage 3-5 min.
- Opsamlingspuden skal kunne skrues ned i glasset uden at du skal presse unødigt. Hvis det ikke kan lade sig gøre er der ikke samlet nok spyt. Gentag pkt. 4.

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Sørg for at der ikke er gået 10 min. fra sidste indtag af mad og drikke, samt tobaks- og nikotinprodukter.

Springetid:

Hash (THC) op til 6 timer. METH og AMP: 1-3 dage. OPI: 1-2 dage. COC og BENZO: 24 timer.




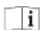



Se yderligere om detektions- / sporingstider på [testdig.dk](http://www.testdig.dk). Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Udvidet vejledning kan hentes direkte her: www.testdig.info - <https://testdig.info/brugervejledninger/>

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
	Læs vejledning før brug
	Antal i pakke
	Udløbsdato
	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co.,Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com

