


# Testdig Multi Narkotest – MN12

THC/COC/AMP/OPI/METH.AMP/OXY/BENZO/METHADONE/TRA/BUP/FEN/KET


1. Fjern narkotesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. Fjern bundcoveret. (test-stripsene vil nu komme til syne)

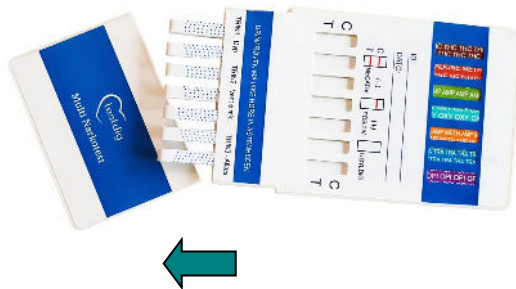

3. Dyp narkotesten i urinprøven i 5 sekunder. Dyp stripsene ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.



4. Fjern narkotesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

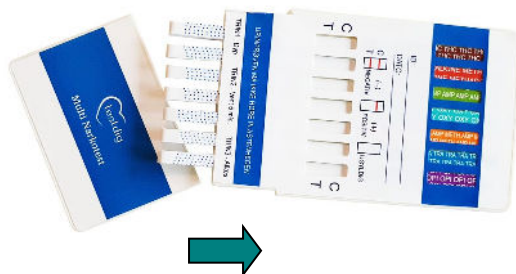

**Test for stoffer:** Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.



## Aflæsning af narkotesten (Aflæs på begge sider af testen)


### Negativt Resultat (ingen stoffer)

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- Én i **KONTROL(C)**-området
- Én i det specifikke **TEST-område (T)**

Tydigheden af stregerne kan variere, men hvis de blot kan skimtes, er det et negativt resultat.

Eksempel på aflæsning:

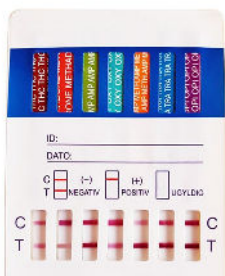


THC: Negativ  
MTD: Negativ  
AMP: Negativ  
OXY: Negativ  
MET: Negativ  
TRA: Negativ  
OPI: Negativ

### Positivt Resultat

I **KONTROL(C)**-området skal der være en farvet streg. Når der **ikke** fremkommer nogen streg i et specifikt testområde (T), er testen positiv for det pågældende stof. Dvs. stoffet er til stede i prøven.

Eksempel på aflæsning:

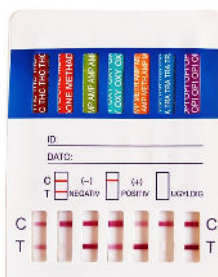

THC: Negativ  
MTD: **Positiv**  
AMP: Negativ  
OXY: Negativ  
MET: Negativ  
TRA: **Positiv**  
OPI: Negativ

### Ugyldigt Resultat

**Ingen streg** ud for **KONTROL(C)**-området: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Følg vejledningen nøje og **gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:



THC: Negativ  
MTD: Negativ  
AMP: **Ugyldig**  
OXY: Negativ  
MET: Negativ  
TRA: Negativ  
OPI: Negativ

## Ordforklaring:

**THC:** Hash, **COC:** Kokain, **AMP:** Amfetamin, **OPI:** Opiater, **METH.AMP/ MET:** Metamfetamin, **OXY:** Oxycodon, **BENZO:** Benzodiazepiner, **METHADONE / MTD:** Metadon, **TRA:** Tramadol, **BUP:** Buprenorfin, **FEN:** Fentanyl, **KET:** Ketamin

Se bagside for yderligere information.

# Testdig Multi Narkotest – MN12

THC/COC/AMP/OPI/METH.AMP/OXY/BENZO/METHADONE/TRA/BUP/FEN/KET

## Tilsigtet brug

Testdig Narkotest screeningstest til at analysere for stoffer i urinen ved nedenstående grænseværdier. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter.

**THC (50ng/ml):** Hash, **COC (300ng/ml):** Kokain, **AMP(1.000ng/ml):** Amfetamin, **OPI(2.000ng/ml):** Opiater, **METH.AMP(1.000ng/ml):** Metamfetamin(inkl. MDMA), **OXY(100ng/ml):** Oxycodon; **BENZO(300ng/ml):** Benzodiazepiner, **METHADONE(300ng/ml):** Metadon, **TRA(50ng/ml):** Tramadol, **BUP(10ng/ml):** Buprenorfin, **FEN(20ng/ml):** Fentanyl, **KET(1.000ng/ml):** Ketamin,

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat.

## Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

## Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation. Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere (max. 48 timer).

## Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på [www.testdig.dk](http://www.testdig.dk)

## Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

## Sporingstid:

Typisk 2-4 dage. Benzodiazepiner op til 14 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC.




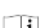
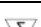

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
Se yderligere om detektions- / sporingstider på [testdig.dk](http://www.testdig.dk). Klik på Narkotest i menuen til venstre.

## Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Udvidet vedledning kan hentes direkte her: [www.testdig.info](http://www.testdig.info) - <https://testdig.info/brugervejledninger/>

## Symbolliste:

|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | In vitro diagnostik     |
|  | Engangstest             |
|  | Opbevar ved 2-30°C      |
|  | Læs vejledning før brug |
|  | Antal i pakke           |
|  | Udløbsdato              |
|  | Batch nummer            |

Fabrikant:



W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd  
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,  
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China  
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117  
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany  
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;  
Email: info@mdss.com

