


Testdig THC Hashtest - TH

THC - 50ng/ml


1. **Fjern** hashtesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. **Fjern** bundcoveret. (test-stripsen vil nu komme til syne)

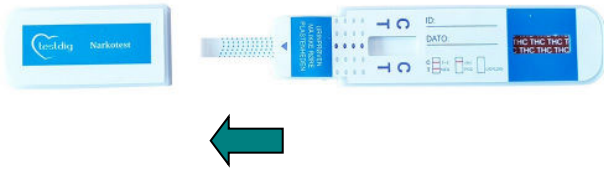


3. Dyp hashtesten i urinprøven i 5 sekunder. **Dyp stripsen ca. halvt ned i urinen. Urinen må ikke røre plastenheden.**



4. **Fjern** hashtesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.

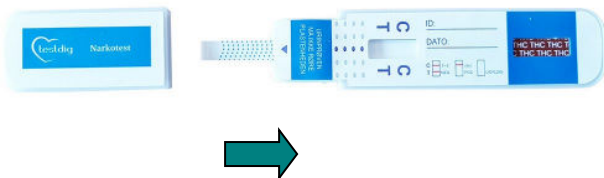

Test for hash: Aflæs resultatet efter cirka 5 minutter. Resultatet er stabilt i 10 minutter. **Aflæs ikke efter 10 min.** Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

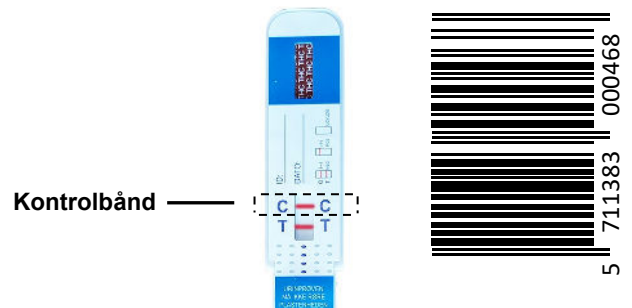

Aflæsning af narkotesten


Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- **En i KONTROL(C)-området**
- **En i det specifikke TEST-område (T)**

Tydigheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige (kan skimtes), er det et negativt resultat. Ingen THC.

Eksempel på aflæsning:

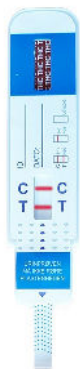

THC: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C)-området** skal der være en farvet streg. Når der **ikke** fremkommer nogen streg i testområde (T), er testen positiv for Hash/THC.

Eksempel på aflæsning:



THC: Positiv

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C)-området**: testen er **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Følg vejledningen nøje og **gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:



THC: Ugyldig

Ordforklaring: THC: Hash

Se bagside for yderlige information.

Testdig THC Hashtest - TH

THC - 50ng/ml

Tilslaget brug

Testdig THC screeningstest til at analysere for THC i urinen ved nedenstående grænseværdi. Anvendes til in vitro brug. Kromatografisk immunanalyse med tværgående flow for kvalitativ sporing af nedenstående stoffer og dets metabolitter.

THC (50ng/ml): Hash

Denne test giver kun et foreløbigt testresultat. Brug en anden mere specifik kvantitativ analytisk metode til at få bekræftet resultatet. Gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) er den foretrukne metode til at få bekræftet et resultat. Anvend klinisk og professionel vurdering til ethvert testresultat, især når der er opnået et foreløbigt positivt resultat.

Inden prøven udføres:

- Tag narkotesten på et tidspunkt som ikke på forhånd er aftalt, da dette vil mindske muligheden for snyd med prøven.
- Personen der testes, må ikke have drukket en masse væske umiddelbart inden testen, da dette vil fortynde indholdet af det pågældende stof i urinen.
- Er der indtaget lægemidler inden for de sidste 14 dage, så skal dette noteres.

Efter prøven er indsamlet:

- Urinen skal have kropstemperatur – ellers kan det være tegn på manipulation. Se på farven – ligner det urin.
- Urinen opbevares i køleskab, hvis den skal gemmes til en test senere (max. 48 timer).

Resultatet af prøven:

En narkotest kan ikke skelne mellem ulovlige og lovlige substanser, derfor kan en narkotest give et positivt resultat, hvis personen der testes, har benyttet forskellige lægemidler. Se under narkotest på www.testdig.dk

Manipulation af prøven:

Der findes i dag et utal af midler, der kan tilsættes en urinprøve, så et positivt resultat sløres. Disse stoffer er primært udbredt i USA, hvor narkotests har eksisteret i mange år. De kan dog købes på internettet og er derfor tilgængelige for danskere.

- Hold derfor opsyn når urinprøven skal afgives, så der ikke snydes med denne.
- Fjern evt. sæbe, klorin og andre rengøringsartikler fra toilettet, så disse ikke benyttes som sløringsmiddel.
- Er urinen helt klar kan det være et tegn på indtag af store mængder væske eller fortynding.

Sporingstid:

Typisk 2-4 dage. Kroniske misbrugere i op til 60 dage på THC.




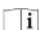
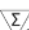

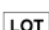
Se yderligere om detektions- / sporingstider på testdig.dk. Klik på Narkotest i menuen til venstre.

Forholdsregler:

- Dette er en engangstest.
- Brug ikke efter udløbsdatoen (EXP.)
- Fjern først testen fra den forseglede pose, når testen skal bruges.
- Opbevares ved 2-30° C.
- Testen bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Udvidet vedledning kan hentes direkte her: www.testdig.info - <https://testdig.info/brugervejledninger/>

Symbolliste:

	In vitro diagnostik
	Engangstest
	Opbevar ved 2-30°C
	Læs vejledning før brug
	Antal i pakke
	Udløbsdato
	Batch nummer

Fabrikant:



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co.,Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanxiang,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China
Tel: 0086-10-84391888; Fax:0086-10-84391888-117
Email:customerservice@whpm.com.cn

Autoriseret Repræsentant:



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
Tel: +49-511-62628630; Fax: +49-511-62628633;
Email: info@mdss.com

